




# PAMĀCĪBA

PRIMĀRO PARAUGU (UZTRIEPE NO MUTES GLĒTĀDAS) NOŅEMŠANAI

## SVARĪGI!!!

- PIRMS PARAUGU NOŅEMŠANAS IZLASIET PAMĀCĪBU LĪDZ GALAM.
- NEVEICIET PARAUGA NOŅEMŠANU TŪLĪT PĒC DZĪVNIKA KONTAKTA AR CITU DZĪVNIĒKU VAI ĒŠANAS (NOGAIDIET VISMAZ VIENU STUNDU).

1

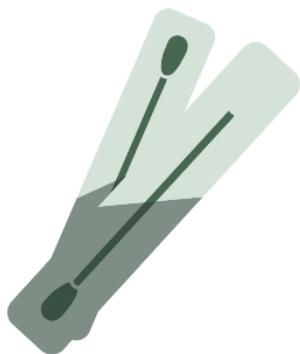

PARAUGA NOŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMI:

- VISMAZ DIVI VATES KOCIŅI VAI BIRSTĪTES **KATRAM TESTĀ IESAISTĪTĀJAM DZĪVNIĒKAM**;
- PLASTIKĀTA MAISIŅŠ (NELIETOTS), VAI ORIĢINĀLAIS INDIVIDUĀLI IESAIŅOTĀ VATES KOCIŅA IEPAKOJUMS.

2



**OBLIGĀTI PROTOKOLĀ NORĀDIET  
KOMPLEKTĀ IEKĻAUTĀS DROŠĪBAS  
UZLĪMES NUMURU.**


3



**AIZPILDIET VISU PROTOKOLĀ PRAŠĪTO  
INFORMĀCIJU GAN PAR DZĪVNIKA  
PĀRSTĀVI UN LIECINIEKU GAN PAR TĒSTĀ  
IESAIŠTĪTĀJĀM DZĪVNIĒKIEM (DRUKĀTIEM  
BURTIEM).**


4

Tēvs  
vai  
Pēcnācējs Nr1

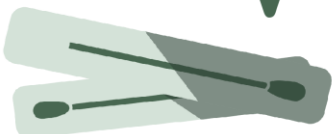

**NOMARKĒJIET DIVU VATES KOCIŅU VAI  
BIRSTĪŠU IEPAKOJUMU AR VIENA  
TESTĒŠANĀ IESAISTĪTĀ DZĪVNIKA VĀRDU  
VAI CITU NOSAUKUMU, KĀDS NORĀDĪTS  
TESTĒŠANAS PROTOKOLĀ.**

5

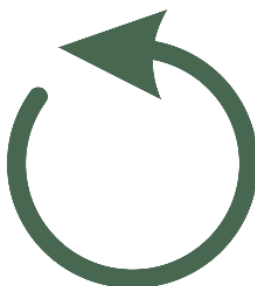

**ATKĀRTOJIET SOLI 4 MARKĒJOT NĀKAMO  
DIVU VATES KOCIŅU VAI BIRSTĪŠU  
IEPAKOJUMUS AR NĀKAMĀ TESTĒŠANĀ  
IESAIŠTĪTĀ DZĪVNIKA VĀRDU VAI CITU  
NOSAUKUMU. TĀ TURPINIET, KAMĒR UZ  
KATRU TESTĒŠANĀ IESAISTĪTO DZĪVNIĒKU  
IR MARKĒTI DIVI VATES KOCIŅU VAI  
BIRSTĪŠU IEPAKOJUMI.**


6



**NOMAZGĀJIET UN NOŽĀVĒJIET ROKAS VAI  
LIETOJIET IEPRIEKŠ NELIETOTUS  
VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS CIMDUS.**

VIETA DROŠĪBAS UZLĪMEI

7

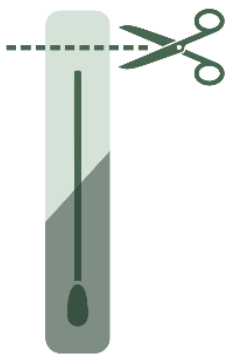

UZMANĪGI (PĒC IESPĒJAS NESABOJĀJOT IEPAKOJUMU) IZŅĒMIET VATES KOCIŅU VAI BRISTĪTI NO IEPAKOJUMA. **PIESKARTIES DRĪKST TIKAI TAM KOCIŅA GALAM UZ KURA NAV VATE VAI BIRSTĪTE.**

8



INTENSĪVI PABERZĒJIET UN ROTĒJIET VATES KOCIŅU VAI BIRSTĪTI PA DŽĪVNIEKA VAIGA IEKŠPUSI APMĒRAM 15 SEKUNDES.




9



**PĀRLIECINIETIES, KA NOŅEMTAIS PARAUGS ATBILST DŽĪVNIEKAM, KURA IDENTIFIKĀCIJA IR UZ VATES KOCIŅA VAI BIRSTĪTES IEPAKOJUMA!** NEKAVĒJOTIES LIECIET VATES KOCIŅU VAI BIRSTĪTI ATPAKAĻ TĀ ORIĢINĀLAJĀ IEPAKOJUMĀ AR GALU, UZ KURĀ IR VATE VAI BIRSTĪTE, VĒRSTU UZ LEJU.

10

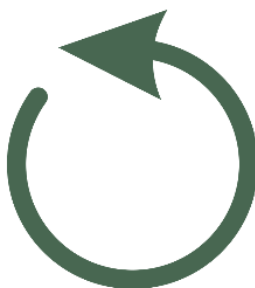


ATKĀRTOJIET SOĻUS 7 LĪDZ 9 AR PĀRĒJIEM VATES KOCIŅIEM VAI BIRSTĪTĒM. **KATRAM TESTĒŠANĀ IESAISTĪTĀJAM DŽĪVNIEKAM JĀBŪT NOŅEMTIEM DIVIEM PARAGIEM.**

11




PARAUGU UZGLABĀŠANAI UN TRANSPORTĒŠANAI NAV NEPIECIEŠAMI ĪPAŠI APSTĀKĻI, KAMĒR TIE IR AIZSARGĀTI NO TIEŠIEM SAULES STARIEM. ILGSTOŠAI UZGLABĀŠANAI (ILGĀK KĀ 2 DIENAS) IESAKĀM PARAUGUS IEVIETOT LEDUSSKAPĪ VAI SALDĒTAVĀ.

12

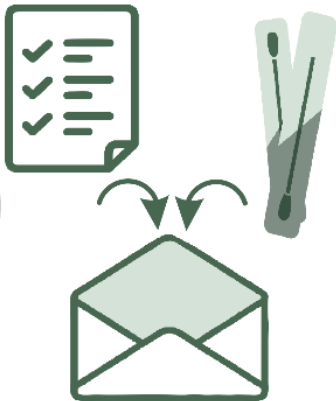

IEVIETOJIET VISUS PARAUGUS UN AIZPILDĪTO PROTOKOLU ATPAKAĻSŪTĪŠANAS APLOKSNĒ, **AIZLĪMĒJIET APLOKSNĪ.**

13

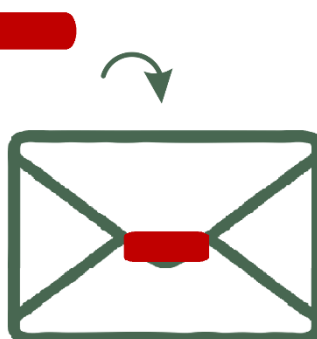

UZLĪMĒJIET UZ JAU AIZLĪMĒTAS ATPAKAĻSŪTĪŠANAS APLOKSNES SARKANO DROŠĪBAS UZLĪMI **TĀ, LAI TĀ PĀRKLĀJ APLOKSNES AIZLĪMĒJUMA VIETU.**

14



NELIETOJOT PASTMARKAS, IEMETIET APLOKSNĪ TUVĀKAJĀ "LATVIJAS PASTS" PASTA KASTĒ, PALŪDZIET TO IZDARĪT LIECINIEKAM VAI CITĀ VEIDĀ NOGĀDĀJIET TO SIA GENERA LABORATORIJĀ. RĀTSUPĪTES IELA 1 K-1, RĪGA, LV-1067.

NOGĀDĀJIET PARAUGUS LABORATORIJĀ/SŪTIET PA PASTU. JA JŪS LIETOJAT MŪSU NEKLĀTIENES PARAUGU NOŅEMŠANAS KOMPLEKTĀ ESOŠO ATPAKAĻ SŪTĪŠANAS APLOKSNĪ, TAD JUMS NAV JĀLIETO PASTA MARKA SŪTĪŠANAI LATVIJAS TERITORIJĀ. VAIRĀK INFORMĀCIJAS: +371 26267833, INFO@GENERA.LV, WWW.GENERA.LV